

BIOCLEAR

前歯部修復を簡単・きれいに！

バイオクリアー マトリックス から
ブラクトライアングルキット 新登場！



バイオクリアー ブラクトライアングルキット



一般医療機器 医療機器届出番号: 13B2X10359110004
製造業者: バイオクリアー社(略称) 製造国: アメリカ合衆国(USA)

フルキット.....

バイオクリアー	ブラクトライアングルマトリックス		
BT062	上顎前歯ブルー	LL	10枚
BT072	上顎前歯グリーン	L	10枚
BT082	上顎前歯イエロー	M	10枚
BT092	上顎前歯ピンク	S	10枚
BT061	下顎前歯ブルー	LL	10枚
BT071	下顎前歯グリーン	L	10枚
BT081	下顎前歯イエロー	M	10枚
BT091	下顎前歯ピンク	S	10枚
バイオクリアー	ブラクトライアングルゲージ		1本

上顎前歯キット.....

バイオクリアー	ブラクトライアングルマトリックス		
BT062	上顎前歯ブルー	LL	10枚
BT072	上顎前歯グリーン	L	10枚
BT082	上顎前歯イエロー	M	10枚
BT092	上顎前歯ピンク	S	10枚
バイオクリアー	ブラクトライアングルゲージ		1本

下顎前歯キット.....

バイオクリアー	ブラクトライアングルマトリックス		
BT061	下顎前歯ブルー	LL	10枚
BT071	下顎前歯グリーン	L	10枚
BT081	下顎前歯イエロー	M	10枚
BT091	下顎前歯ピンク	S	10枚
バイオクリアー	ブラクトライアングルゲージ		1本

単品

バイオクリアー	ブラクトライアングルマトリックス	各種	10枚
バイオクリアー	ブラクトライアングルゲージ		1本

BT MATRIX




BIOCLEAR

PART NO. XXX PATENT# 6,567,981

バイオクリアー ブラケットライアングルキット

色分けされたゲージとマトリックスで簡単・迅速にブラケットライアングル閉鎖

- ゲージ先端部をコンタクト下の歯間空隙に入るところまで挿入し、切縁側から見て、ゲージ先端部のカラーと同じ色のタブ色のマトリックスを選択することによって、簡単・迅速に、マトリックスを選択することができますので、バイオクリアーマトリックス 前歯用 を使用した場合よりも、最大 40%速く*、ブラケットライアングルを閉鎖することができます。
- 選択したマトリックスは適切な湾曲幅を示し、適用前のトリミングが不要です。

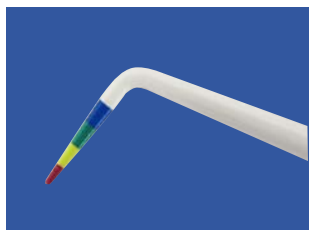


*バイオクリアー社調べ

マトリックスセレクションガイド

上顎前歯				下顎前歯			
BT062 ブルー LL	BT072 グリーン L	BT082 イエロー M	BT092 ピンク S	BT061 ブルー LL	BT071 グリーン L	BT081 イエロー M	BT091 ピンク S
幅: 4.68mm 高さ: 17.48mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.8mm 歯間空隙: 2.5mm	幅: 4.64mm 高さ: 17.48mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.6mm 歯間空隙: 2.0mm	幅: 4.64mm 高さ: 17.48mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.4mm 歯間空隙: 1.5mm	幅: 4.66mm 高さ: 17.48mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.2mm 歯間空隙: 1.0mm	幅: 4.35mm 高さ: 15.46mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.8mm 歯間空隙: 2.5mm	幅: 4.20mm 高さ: 15.46mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.6mm 歯間空隙: 2.0mm	幅: 3.83mm 高さ: 15.46mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.4mm 歯間空隙: 1.5mm	幅: 3.72mm 高さ: 15.46mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.2mm 歯間空隙: 1.0mm

- ◎ 上表のマトリックスセレクションガイドは目安として、歯の解剖学的形態および状況によって各症例に適合するマトリックスを選択してください。
- ◎ ゲージの挿入時に各色の境界にある場合は、より小さいサイズのマトリックスを選択してください。
- ◎ 湾曲幅は、各々のマトリックス歯頸部辺縁からコンタクトまでの湾曲幅です。

ご使用方法

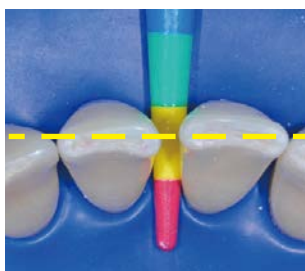

修復する歯牙の歯間部の唇側から舌側にゲージを挿入し、切縁側から見て、ゲージ先端部のカラーと同じ色のマトリックスのタブ色で、歯牙のサイズに適合するマトリックスの種類を選択します。



バイオクリアー染色液(別売)を歯面に塗布し、水洗し、染まったバイオフィルムを歯面清掃します。必要に応じて、あらかじめ修復する歯牙の歯間部隣接の接触面を歯科用研削ストリップ コンタックEZ(別売)にて研削・研磨を行います。



マトリックスのタブを保持し、タブを切縁(咬合面)方向に向け、反対側の辺縁を歯間部および歯肉溝内に挿入し、適合させます。



通常に従って、接着処理を行い、コンポジットレジン修復を行います。光照射し、マトリックスを取り外し、形態修正・研磨します。

表面 臨床写真ご提供: エメロード歯科クリニック 田中 国継 先生

販売元



株式会社ミツバオーソサプライ

〒170-0002 東京都豊島区巢鴨2-16-4メゾンカタヤマ2F
TEL. 03-3949-0066 FAX. 03-3949-0090
URL <http://www.mitsuba-ortho.com>

製造販売元: 株式会社モリムラ
〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351