

歯科医院専用

スマイルデント

# アライナー・リテーナー洗剤

## KEEP CLEAN and CLEAR!

### ダブル除菌剤配合

**Ag<sup>+</sup> 銀イオン**

アルミノケイ酸塩（銀イオン含有）から銀イオンが放出され、アライナー等に付着している菌を取り除きます。



**CPC 塩化セチルピリジニウム**

アライナー等に付着している菌を取り除きます。CPCは、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。



### 特徴

#### パワフル除菌

カンジダ菌  
除菌率※  
**99.99%**

※衛生微生物研究センター  
※5分で99.99%除菌します。  
※全ての菌に効果があるわけではありません。

- ① **パワフル除菌** アライナー等に付着しているカビやバイ菌を強力に落とします。
- ② **ニオイを防ぐ** ニオイのもとになる汚れを落とし、口臭への悪影響を防ぎます。
- ③ **スッキリ洗浄** 酵素の力で汚れを分解し、気持ちよく仕上げます。
- ④ **着色料無配合** 色移りの心配がありません。
- ⑤ **ミントの香り** さわやかなミントの香りでスッキリ爽快。

### 使用方法

1


約150mLの水またはお湯（40～50℃）に錠剤を1錠入れます。

⚠ 60℃以上のお湯で使用しないでください。

※水温が低いとまれに発泡しにくくなります。40～50℃のお湯をおすすめします。

⚠ 錠剤の包装は使用する直前に切り離して開けてください。

※開けたまま放置すると発泡しないことがあります。

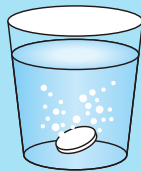

2

すぐにアライナー等を浸してください。

※ふつうの汚れの洗浄は5分程度で終了します。特に汚れがひどい場合は、一晚浸しておくとも効果的です。



3

洗浄後は水でよくすすいでください。


⚠ ごくまれに汚れが落ちない場合がありますが、無理な洗浄やブラッシングはせずに、歯科医にご相談されることをおすすめします。

⚠ 溶液は毎回お取替えください。

※本製品をご使用后、洗浄液が白濁したり、沈殿物が残ることがありますが、品質には問題ありません。

毎日の使用で、さらに効果が増します。

錠剤は1回1錠が目安です。また、溶液は毎回お取替えください。

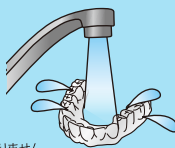

#### 成分

漂白剤（過硫酸塩、過ホウ酸塩）、アニオン系界面活性剤、アルミノケイ酸塩、塩化セチルピリジニウム（CPC）、セラック、漂白活性化剤（TAED）、酵素、ポリリン酸塩、発泡剤、結合剤、流動改善剤、香料

#### 液性

中性

#### 内容量

2.8g × 60錠



60錠入

株式会社モリムラ  
〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F  
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

形態・仕様は予告なく変更することがあります。



株式会社ミツバオーソサプライ  
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-16-4メゾンカタヤマ2F  
TEL. 03-3949-0066 FAX. 03-3949-0090  
URL <http://www.mitsuba-ortho.com>