

歯列矯正してる人のリテーナー洗浄剤


リテーナークリーン Viva⁺ (美歯)

キレイな歯並びには
キレイなお口環境を。
毎日のお手入れにより、
さらに効果が増します。



クリーンメカニズム トリプルパワーでスッキリ洗浄!

※イメージ図

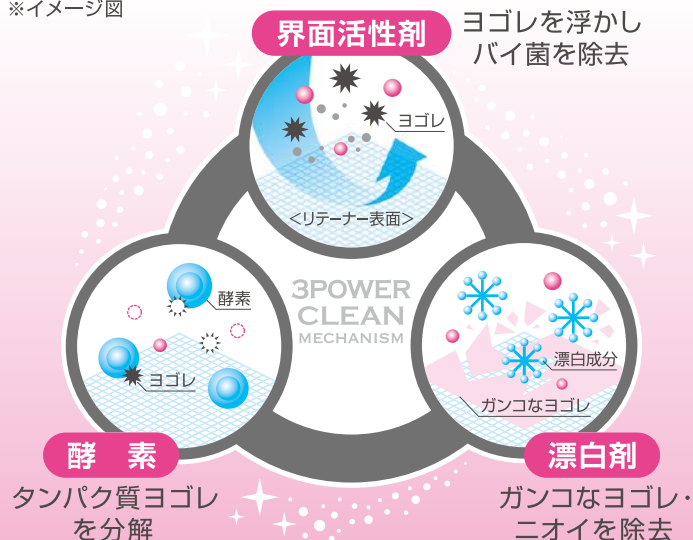

●48箱入
(1箱60錠入)



なぜリテナーをキレイに しなければいけないの？

その理由は

- ❶ ヨゴレが溜まりやすい。
- ❷ バイ菌が繁殖しやすい。
- ❸ 虫歯になりやすい。
- ❹ 口臭が臭くなる。

だからなの！



リテナーは専用の洗浄剤で 洗うのがベスト！

その理由は

- ❶ リテナーを傷つけない
- ❷ 目に見えないヨゴレやバイ菌も
ノックアウト
- ❸ 簡単・手軽

だからなの！

ママからの一言

歯並びはキレイ！でも虫歯だらけ・・・ということにならないように、毎日きちんとお手入れをすることが欠かせません。でもリテナーはとても傷つきやすいので、研磨剤入りの歯磨き粉を使ったり、自然歯用の硬い毛先の歯ブラシを使ってゴシゴシするのは逆効果です。正しい知識を持って、楽しみながら歯列矯正ライフを送って下さい。



リテナークリーンVivaの 3大特長



3大特長 その1 **Cool**

フレッシュなピンクグレープ
フルーツの香りと
クールなミントの香りで
お口爽やか！



3大特長 その2 **Easy**

3ステップで簡単洗浄！

※使用方法をご参照下さい。




3大特長 その3 **Clean**

ニオイもバイ菌もクリーンアップ！

- ❶ 界面活性剤の「浮かし」効果
- ❷ 漂白剤の「除去」効果
- ❸ 酵素の「分解」効果

クリーンメカニズム トリプルパワーでスッキリ洗浄！

※イメージ図

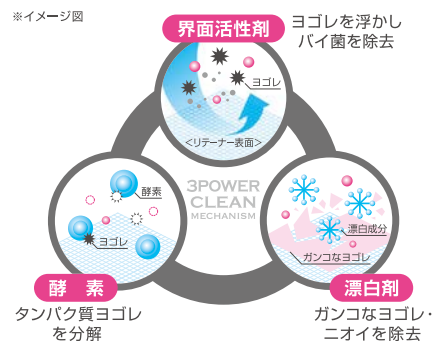

使用方法

step.1



約150mLの水または
お湯(40～50℃)に、
本品を1錠入れます。

水温が低いとまれに発泡
しにくくなることある
ため、お湯をお薦めします。

step.2



すぐにリテナーを
浸してください。

ふつうのヨゴレの洗浄は
5分程度、ひどい場合は
浸け置きが効果的です。

step.3



洗浄後は水でよくすすい
でください。

溶液は毎回お取替えください。
同様の洗浄方法でリテナー
レトリバーも洗浄できます。

成分

- ・漂白剤
(過硫酸塩、過ホウ酸塩)
- ・アニオン系界面活性剤
- ・酵素
- ・炭酸塩
- ・クエン酸
- ・結合剤
- ・流動改善剤
- ・香料
- ・色素

液性

- ・中性

内容量

- ・2.8g × 60錠

形態・仕様は予告なく変更することがあります。

●製品に関するご用命は



株式会社ミツバオーソサプライ
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-16-4メゾンカタヤマ2F
TEL. 03-3949-0066 FAX. 03-3949-0090
URL <http://www.mitsuba-ortho.com>

販売業者 株式会社モリムラ

東京都台東区三ノ輪 1-28-10-3F
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

製造業者 白元アース株式会社

お問い合わせ
〒123-0852 東京都足立区関原 2-42-1
TEL. 03-5845-5860 FAX. 03-3887-5350