
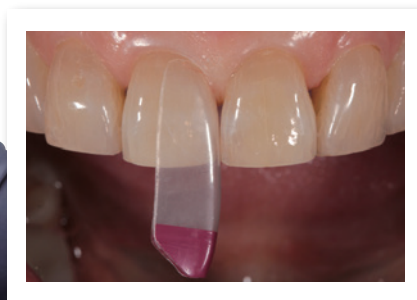


BIOCLEAR

前歯部修復を簡単・きれいに！

バイオクリアー マトリックス ブラクトライアングルキット

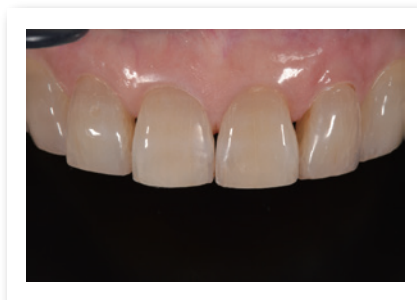

バイオクリアー ブラクトライアングルキット



上顎前歯ミニキット

バイオクリアー ブラクトライアングルマトリックス
B T082 上顎前歯イエロー M 10 枚
B T092 上顎前歯ピンク S 10 枚
 バイオクリアー ブラクトライアングルゲージ 1 本

下顎前歯ミニキット

バイオクリアー ブラクトライアングルマトリックス
B T081 下顎前歯イエロー M 10 枚
B T091 下顎前歯ピンク S 10 枚
 バイオクリアー ブラクトライアングルゲージ 1 本

単品

バイオクリアー ブラクトライアングルマトリックス
B T062 上顎前歯ブルー L L 10 枚
B T072 上顎前歯グリーン L 10 枚
B T082 上顎前歯イエロー M 10 枚
B T092 上顎前歯ピンク S 10 枚
B T061 下顎前歯ブルー L L 10 枚
B T071 下顎前歯グリーン L 10 枚
B T081 下顎前歯イエロー M 10 枚
B T091 下顎前歯ピンク S 10 枚

バイオクリアー ブラクトライアングルゲージ 1 本入

一般医療機器 医療機器届出番号:13B1X10394110004
 製造業者:バイオクリアー社(略称) 製造国:アメリカ合衆国(USA)

BT MATRIX



BIOCLEAR



バイオクリアー ブラケットライアングルキット

色分けされたゲージとマトリックスで簡単・迅速にブラケットライアングル閉鎖

- ゲージ先端部をコンタクト下の歯間空隙に入るところまで挿入し、切縁側から見て、ゲージ先端部のカラーと同じ色のタブ色のマトリックスを選択することによって、簡単・迅速に、マトリックスを選択することができますので、バイオクリアーマトリックス 前歯用 を使用した場合よりも、最大 40%速く*、ブラケットライアングルを閉鎖することができます。
- 選択したマトリックスは適切な湾曲幅を示し、適用前のトリミングが不要です。

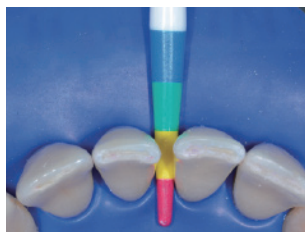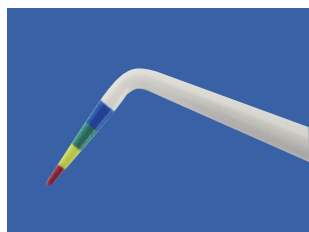

*バイオクリアー社調べ

マトリックスセレクションガイド


上顎前歯				下顎前歯			
BT062 ブルー LL	BT072 グリーン L	BT082 イエロー M	BT092 ピンク S	BT061 ブルー LL	BT071 グリーン L	BT081 イエロー M	BT091 ピンク S
幅: 4.68mm 高さ: 17.48mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.8mm 歯間空隙: 2.5mm	幅: 4.64mm 高さ: 17.48mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.6mm 歯間空隙: 2.0mm	幅: 4.64mm 高さ: 17.48mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.4mm 歯間空隙: 1.5mm	幅: 4.66mm 高さ: 17.48mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.2mm 歯間空隙: 1.0mm	幅: 4.35mm 高さ: 15.46mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.8mm 歯間空隙: 2.5mm	幅: 4.20mm 高さ: 15.46mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.6mm 歯間空隙: 2.0mm	幅: 3.83mm 高さ: 15.46mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.4mm 歯間空隙: 1.5mm	幅: 3.72mm 高さ: 15.46mm 厚さ: 75 μm 湾曲幅: 0.2mm 歯間空隙: 1.0mm

◎上表のマトリックスセレクションガイドは目安として、歯の解剖学的形態および状況によって各症例に適合するマトリックスを選択してください。

◎ゲージの挿入時に各色の境界にある場合は、より小さいサイズのマトリックスを選択してください。

◎湾曲幅は、各々のマトリックス歯頸部辺縁からコンタクトまでの湾曲幅です。

ご使用方法

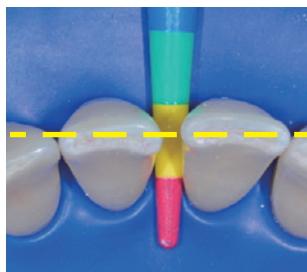

修復する歯牙の歯間部の唇側から舌側にゲージを挿入し、切縁側から見て、ゲージ先端部のカラーと同じ色のマトリックスのタブ色で、歯牙のサイズに適合するマトリックスの種類を選択します。



バイオクリアー染色液(別売)を歯面に塗布し、水洗し、染まったバイオフィルムを歯面清掃します。必要に応じて、あらかじめ修復する歯牙の歯間部隣接の接触面を歯科用研削ストリップ コンタックEZ(別売)にて研削・研磨を行います。



マトリックスのタブを保持し、タブを切縁(咬合面)方向に向け、反対側の辺縁を歯間部および歯肉溝内に挿入し、適合させます。



通法に従って、接着処理を行い、コンポジットレジン修復を行います。光照射し、マトリックスを取り外し、形態修正・研磨します。

本紙に掲載されている情報は2024年4月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

表面 臨床写真ご提供: エメロード歯科クリニック 田中 国継 先生

販売元



株式会社ミツバオーソサプライ

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-16-4メゾンカタヤマ2F

TEL. 03-3949-0066 FAX. 03-3949-0090

URL <http://www.mitsuba-ortho.com>

製造販売元: 株式会社モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL. 03-5808-9350 FAX. 03-5808-9351