



エキスパンションスクリュー POPタイプ



柔軟性ある矯正装置の作成に。

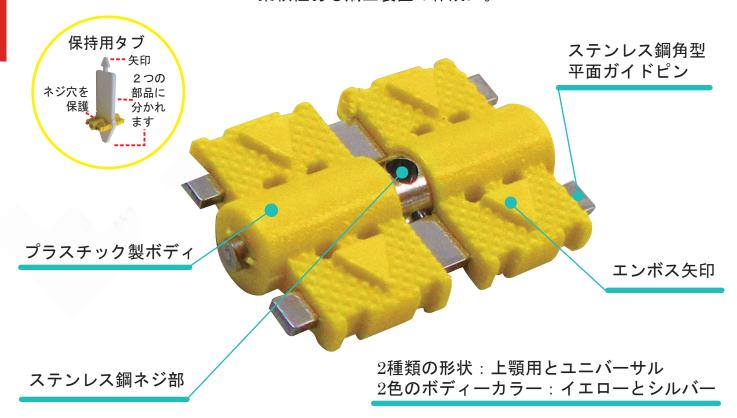

安定した左右対称の連続的拡大移動が可能

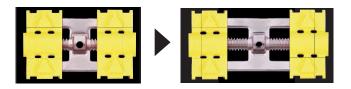

●ステンレス鋼ネジ部

ネジ山が、プラスチックボディに覆われていますので、歯列矯正用アクリルレジンと 直接、ネジ山が接触することがなく、レジンの影響によるスクリューの逆回転を防止します。 ボディに柔軟性がありますので、快適な装着をすることができます。

●精密なネジ部と角型平面ガイドピン 安定した左右対称の連続的拡大移動が可能です。

●保持用タブ

ネジ部のネジ穴を保護し、歯列矯正用アクリルレジン填入時に、レジンとネジ穴との接触を 防止します。

装置完成後、保持用タブは2つの部品に分かれ、スクリューから容易に取り外すことができます。

●回転方向矢印

ボディのエンボス矢印は回転(アクチベーション)方向を示します。ボディに類似した 色の歯列矯正用アクリルレジンを使用する場合には、保持用タブ上の白い矢印を切り離し、 矢印の凹みをボディのエンボス矢印に被せて、はめ込みますと、回転(アクチベーション) 方向を識別しやすくなります。



エキスパンションスクリュー POPタイプ












↑アクチベーション方向を識別しやすい矢印部



精密な本体で、安定した連続的拡大移動が可能です。 柔軟性があるため、装置と口腔内と高い適合性があります。 POPタイプの種類は上顎用とユニバーサルがあり、色はイエローとシルバーがあります。

エキスパンションスクリュー POPタイプ 上顎用

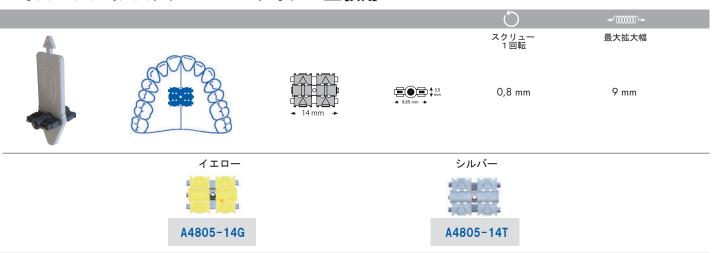

エキスパンションスクリュー POPタイプ ユニバーサル

				Ó	≠ /()))}\ -
\$				スクリュ ー 1 回転	最大拡大幅
and the last of th		+ 12 mm →	♣ 3	0,7 mm	8 mm
	1ID-		シルバー		
	A4800-12G		A4800-12T		



IN ORTHODONTICS SINCE 1934

形態・仕様は予告なく変更することがあります。

販売名:レオーネ エキスパンションスクリュー 管理医療機器 一般的名称:歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号 301AGBZX00085000



