



POP!

Perfect Orthodontic Performance

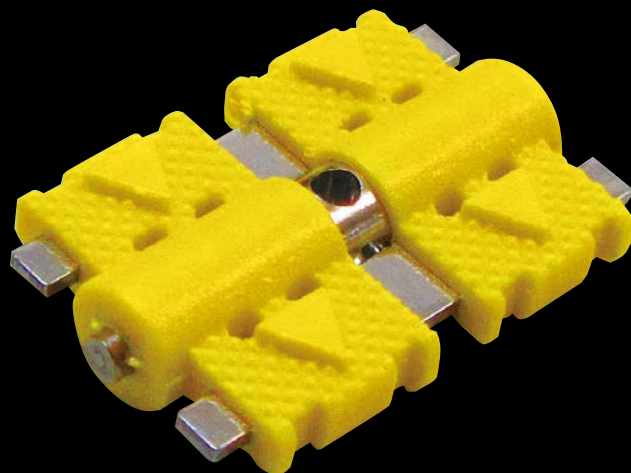

- ネジ山がフラッシュに覆われているため、ネジ山がアクリルレジンに接触しません。
- ネジ山が直接アクリルレジンに接触しないため、レジンを巻き込まず、スクリューの逆回転が起こりません。

柔軟性ある拡大装置の作成に

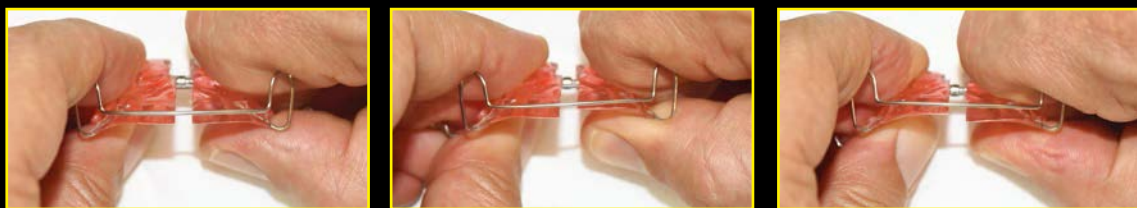

POPエキスパンションスクリュー



ORTHODONTICS AND IMPLANTOLOGY




POPエキスパンションスクリュー



柔軟性あるスクリューのため、安定した連続的拡大移動が可能で、戻りを防止します。

Orthodontics and Implantology

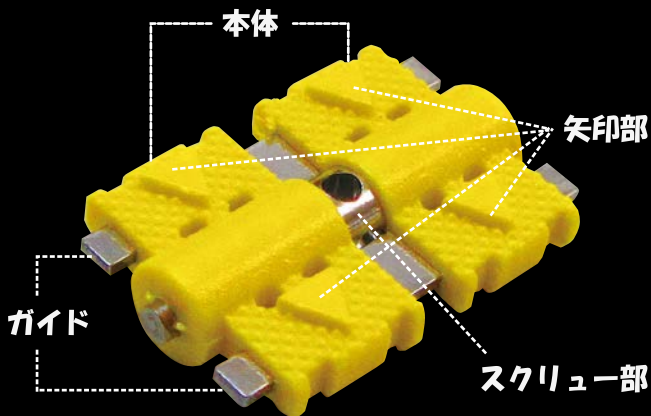

●本体

精密な本体で、安定した連続的拡大移動が可能です。柔軟性があるため、装置と口腔内と高い適合性があります。

●スクリュー部/ガイド

精密なネジ山のスクリュー部で、左右対称の安定した連続的拡大移動が可能です。角型平面ガイドにより、左右対称の拡大移動が可能です。

●保持用タブ

保持用タブは、スクリュー部のネジ穴を保護し、矯正用アクリルレジン填入時にレジンとネジ穴との接触を防止します。


装置完成後、保持用タブは2つの部品に分かれ、スクリュー部から容易に取り外すことができます。




●矢印部

本体の矢印部はアクチベーション方向を示します。保持用タブ上の白い矢印部を切り離し、矢印部の凹みを本体の矢印部のエンボスに被せて、はめ込みますと、アクチベーション方向を識別しやすくなります。

安定した左右対称の連続的拡大移動が可能


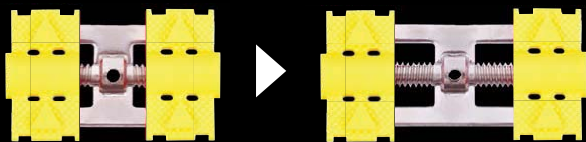


アクチベーション方向を識別しやすい矢印部

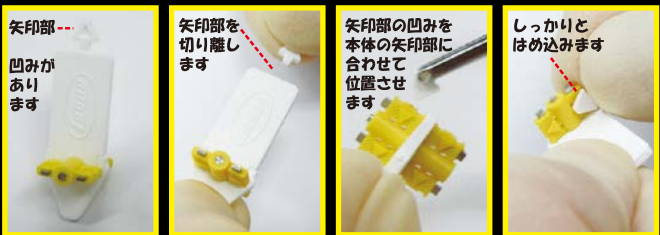

POPエキスパンションスクリューの種類は上顎用とユニバーサルがあり、色はイエローとグレーがあります。

POPエキスパンションスクリュー(上顎用) 14mm 10個入

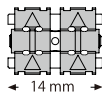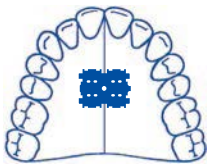

0,8 mm


9 mm



A4805-14G

A4805-14T

POPエキスパンションスクリュー(ユニバーサル) 12mm 10個入

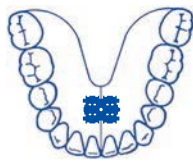

0,7 mm

8 mm



A4800-12G

A4800-12T

管理医療機器

一般の名称：歯列矯正用アタッチメント

医療機器認証番号：228AGBZX00073000

製造業者：LEONE S.p.A (レオーネ エス・ピー・エー社)

製造国：イタリア

販売元



株式会社ミツバオーソサプライ

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-16-4メゾンカタヤマ2F

TEL. 03-3949-0066 FAX. 03-3949-0090

URL <http://www.mitsuba-ortho.com>

製造販売元：株式会社モリムラ
〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351