

歯列矯正用バンドの合着に 光重合型接着材

Ⓜ ウルトラ バンドLOK



■ 1ペーストタイプ

- 混和不要の1ペーストタイプのため、直接歯列矯正用バンドにペーストを塗布することができます。
- 容易に塗布しやすいペースト性状です。

■ 光重合型

- 光照射するまでは、ペーストの塗布時間およびセット時間に余裕があります。
- 光照射により硬化し余剰ペーストの除去を行うことができますので、作業時間を短縮します。

■ フッ素徐放性

■ 不快なおいや後味がありません

フッシュリンジ



Only from  RELIANCE®

■ ブルーペースト

- 歯質との識別が容易のため、余剰ペーストの除去および歯列矯正用バンドの取り外し後の接着材の除去を容易にします。




✓ 簡単に接着材を除去できます


歯列矯正用バンドの合着に 光重合型接着材

Ⓜ ウルトラバンドLOK


ご使用方法

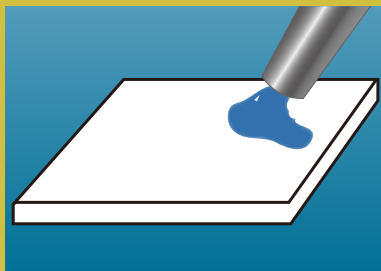


本品のキャップを取り外し、シリンジ先端からペーストを押し出します。

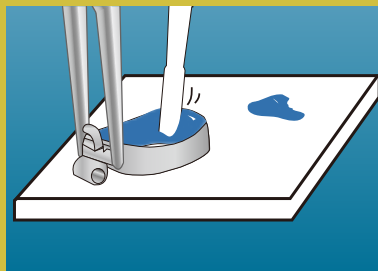


バンドの内面に（均一に薄く）塗布する。

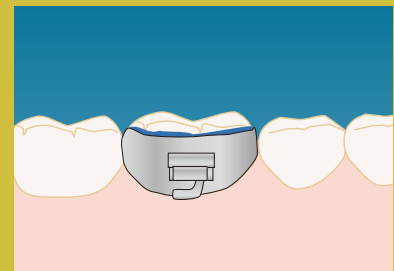

バンドを所定の位置にて装着し、固定させます。

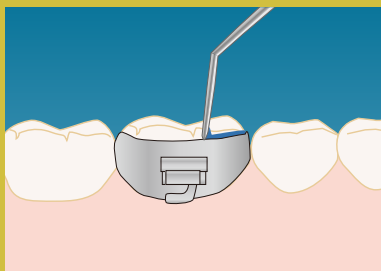

余剰ペーストを除去します。

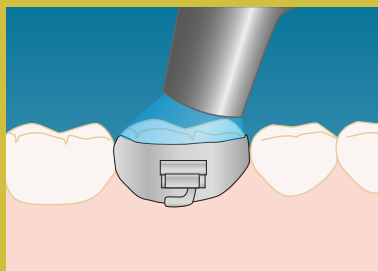

咬合面側から、バンドの頂上付近をゆっくりと円を描くように動かしながら、30秒間（500mW/cm²）光重合します。

※ご使用後は、直ちに、キャップを閉めてください。

※直射日光、高温多湿を避け、2～8℃の暗所にて冷蔵保管してください。



ウルトラバンドLOK ブルー・2本入

内容

・ウルトラバンドLOK ブルー
プッシュシリンジ 5g入 × 2本

標準価格 **¥15,300**

医療機器認証番号: 304AGBZX00056000 管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材(31750002)
製造業者: Reliance Orthodontic Products, Inc. (リライアンス オーソドンティック プロダクツ社) 製造国: アメリカ合衆国 (USA)
本紙に掲載されている価格は2022年8月現在のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

販売元



株式会社ミツバオーソサプライ

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-16-4メゾンカタヤマ2F
TEL. 03-3949-0066 FAX. 03-3949-0090
URL <http://www.mitsuba-ortho.com>

製造販売元: 株式会社モリムラ
〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-5808-9350 FAX.03-5808-9351