

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 歯科用開口器 (70949000)
チークリトラクターLF

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 2.再使用禁止。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリムラ
電話番号 03-5808-9350
製造国 中華人民共和国
製造業者 Tangshan Zhengtong Exhibition Co.,Ltd.
(タンシャン ツェントン エキシビション カンパニー リミテッド)

【形状・構造及び原理等】



種類	サイズ(L×W×H)
*ミディアム	約 95×84×44mm
*スモール	*約 93×83×38mm

カラー:ホワイト

材質:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー樹脂 (TPE)

【使用目的又は効果】

本品は、歯科治療で患者の開口状態を保持する器具である。

【使用方法等】

- *1.患者の口唇に応じて適切なサイズを選択する。
- 2.親指と中指で外リング側から、内リングの上部と下部を保持し、口腔内に装着しやすい形状に軽く曲げる。
- 3.内リングの左右いずれかを口角の裏側に合わせて、頬側粘膜部へ挿入する。
- 4.内リングを親指と中指で保持したまま、反対側を、2の操作と同様に口腔内に挿入する。
- 5.上唇と下唇の裏側に添わせるように内リングの位置を指で調整し、外リングは口腔外にくるように装着する。
- 6.本品を取り外すときは、外リングの下側をペーパータオルなどで保持しながら持ち上げて、内リングを取り外した後、上側も取り外し、ペーパータオル等に包んで廃棄する。

[使用方法における使用上の注意]

本品の装着後、口腔内から外れないよう確認すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1.単回使用。再使用は交差感染を引き起こす可能性がある。
- 2.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光を避け、汚染のない乾燥した場所で保管すること。