

機械器具 58 整形用機械器具  
一般医療機器 短期的使用歯科矯正用粘膜保護材(70735000)  
(歯科用充填・修復材補助器具(38782000))

## リライアワックス

ディスペンシングチップは再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

1. 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
2. ディスペンシングチップは再使用禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状

透明で粘性のあるジェル状でシリンジに封入される。  
ブラックライト下で蛍光色になるため識別が容易である。



#### 2. 原材料

本品：カンファーキノン、二酸化ケイ素、HEMA、その他  
ディスペンシングチップ：ポリプロピレン、ステンレス鋼

#### 3. 原理

矯正器具の突起を覆い光硬化させることで口腔内粘膜を保護し、患者の不快感を軽減する。

### 【使用目的又は効果】

歯科矯正装置による口腔内粘膜への刺激を緩和するために装置を被覆する材料で、短期に使用する。

### 【使用方法等】

#### <塗布>

1. 適用部位を乾燥させます。
2. シリンジキャップを取り外し、ディスペンシングチップを取り付けます。
3. シリンジのプランジャーをゆっくりと一定の力で押し、チップの先端で矯正器具の突起を包み込むように本品を適用します。矯正器具の周辺部まで覆うように塗布すると、口腔内粘膜を確実に保護することができます。
4. 光照射を行い硬化させます。(500mW/cm<sup>2</sup>で20秒間)

#### <除去>

ピンセット等を使用して除去します。

### 【使用上の注意】

#### [使用注意]

光照射器を使用する際には、保護メガネ等を使用すること。

#### [重要な基本的注意]

1. 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
2. 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
3. 本品を皮膚に付着させたりしないように注意すること。皮膚に付着した場合は、すぐに石鹸と流水で十分に洗浄すること。

4. 万一、目に入った場合はすぐに多量の流水で洗浄し、必要に応じて眼科医の診断を受けさせること。
5. ディスペンシングチップは再使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### [保管方法]

直射日光、高温多湿を避け、15～25℃の暗所にて保管すること。

#### [使用期限等]

構成品の包装に記載の使用期限までに使用すること。  
記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 株式会社モリムラ  
電話番号 03-5808-9350  
Reliance Orthodontic Products, Inc.  
製造業者 (リライアンス オーソドンティック プロダクツ社)  
製造国 アメリカ合衆国 (USA)